



**ООО «Медтехника Реботек»**




125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д 35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: [info@rebotec.net](mailto:info@rebotec.net)

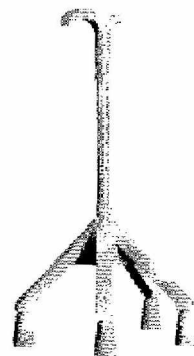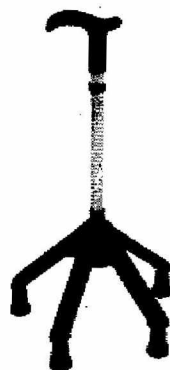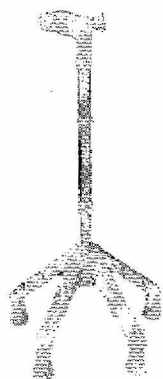

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **Трости опорные на 4 ножках**

#### **Применение**

Трости опорные на 4 ножках (далее трости) предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения повышенной надежности при ходьбе. Данный продукт можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.


Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

## Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку

### **Установка высоты тростей на 4 ножках**

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (A).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (B) или вынуть клип-фиксатор (C).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или защелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (A) (если Вы затянете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании).

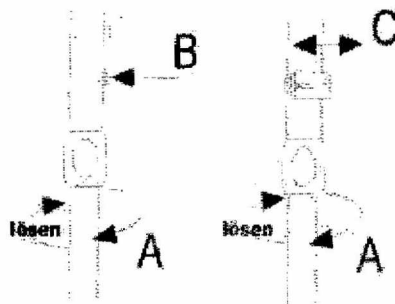

### **Замена резинового наконечника**

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (E). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



**Внимание!** Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубки костыля. Результатом этого может стать повреждение лапольного покрытия или падение.

## Техническое обслуживание

### **Уход**

Трубку трости достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

**Внимание!** Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

### **Обслуживание**

Перед каждым использованием проверяйте трости на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении трости нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

## **Ремонт**

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

## **Инструкции по технике безопасности**

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте трость на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.
- Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить трость в сторону, чтобы Вы не упали на нее.



**Внимание!** Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечники на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе трость должна быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте её далеко от туловища.
- Используйте трость только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае ее нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не допускать попадания на трость солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Используйте трость без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

## **Технические характеристики**

Наименование трости на 4 ножках	Модель	Нагрузка, кг	Высота, см	Рукоятка	Цвет*
Реботек 1/4	150	100	63,0 – 85,5	анатом	00/10/50/80/95
Реботек 1/4	151	100	63,0 – 85,5	анатом	00/10/50/80/95
Реботек 1/4	152П	100	63,0 – 85,5	анатом	00/10/50/80
Реботек 1/4	154П	100	63,0 – 85,5	анатом	00/10/50/80
Реботек 1/4	153	100	63,0 – 85,5	эргоном	00/10/50/80

\* Л/П - под левую/правую руку

\*\* 00 - белый; 10 - черный; 50 - синий; 80 - зеленый; 95 - цветной