

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «АМТ трейд»

А.Ю. Пучков  
\_\_\_\_\_ 2008г.



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению **МОЧЕПРИЕМНИКА МУЖСКОГО ЛАТЕКСНОГО «ММ-АМТТ»**

Мочеприемник предназначен для мужчин, страдающих недержанием мочи в ночное время.

Мочеприемник состоит из мочеулавливателя, клапана, резервуара со сливным устройством, фиксирующих колец.

### Комплектность:

- |                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Мочеприемник в сборе<br>(мочеулавливатель, клапан, резервуар, трубка с пробкой) | - 1 шт |
| 2. Мочеулавливатель                                                                | - 9 шт |
| 3. Кольцо                                                                          | - 4 шт |

Комплект рассчитан на эксплуатацию в течение 10 суток, мочеулавливатель – однократного применения в течение 1-х суток.

### Применение

Мочеприемник со скатанным мочеулавливателем плотно приставить к головке полового члена и, раскатывая край, надеть его до основания полового члена, за петли прикрепить мочеприемник к индивидуальному поясу.

Для опорожнения мочеприемника необходимо вынуть пробку и слить содержимое.

Ежедневно необходимо производить замену мочеулавливателя, для этого снять фиксирующее кольцо с мочеулавливателем и клапаном, промыть клапан и резервуар кипяченой водой (30°-40°С), высушить на воздухе, опудрить внутреннюю поверхность резервуара тальком во избежание слипания, затем надеть новый мочеулавливатель на клапан и зафиксировать его кольцом.

За время эксплуатации допускается 3-кратная дезинфекция мочеприемника 1-% раствором хлорамина в течение 30 минут при комнатной температуре.

### Запрещается

Обрабатывать мочеприемники спиртовыми растворами, маслами, кислотами, растворителями.

Подвергать мочеприемник кипячению.

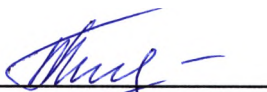
Сушить мочеприемник при прямом воздействии солнечных лучей и вблизи отопительных приборов.

### Хранение

Мочеприемник должен храниться в закрытом помещении при температуре от 15° до 25°С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

Технолог

  
\_\_\_\_\_ Тюрин Г.В.  
(подпись)

Генеральный директор

ООО «АМТ трейд»

  
\_\_\_\_\_ Пучков А.Ю.